



La mascarilla nasal compacta diseñada para adaptarse a todos los pacientes

Todos los rostros son diferentes, pero nuestra nueva AirFit N20 se ajusta fácilmente a la fisionomía de todos sus pacientes. Esta mascarilla nasal compacta ofrece a los pacientes un campo de visión más amplio y facilita sus movimientos gracias a la almohadilla de silicona InfinitySeal™, diseñada para obtener un sellado resistente, independientemente de la forma o el tamaño del rostro.



Fácil de ajustar

Según la más reciente evidencia clínica publicada, la nueva AirFit N20 se adapta al 99,4% de los pacientes.¹

La fisionomía facial ya no es impedimento para ajustar la mascarilla, gracias a la almohadilla de silicona que se adapta a las diferentes formas del rostro de sus pacientes.

Cómoda de usar


Ligera y ergonómica, y diseñada con materiales suaves al tacto, desde la almohadilla hasta el armazón y el arnés.

Libertad visual

La mascarilla AirFit N20 permite a los pacientes llevar gafas, leer, ver la televisión o usar el ordenador o la tablet en la cama gracias a que su armazón está diseñado para que se sitúe bajo los ojos y tenga un mínimo contacto con la cara.

La mascarilla nasal más elegida

El 92% de los pacientes prefirieron usar AirFit N20 frente a la mascarilla nasal líder actual del mercado.²

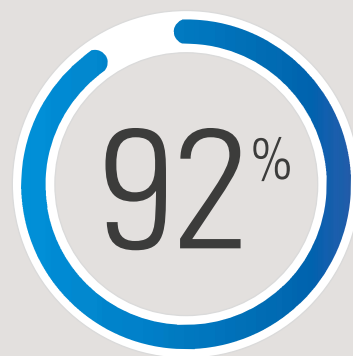

Ligera y ergonómica

El arnés de felpa, específicamente diseñado para ofrecer una suavidad adicional al tacto, ayuda a asegurar que los pacientes se adaptan al tratamiento de una manera rápida y cómoda.

Sellado fiable

Proporciona a los pacientes un sellado fiable y eficaz gracias a la almohadilla de silicona InfinitySeal, diseñada para prevenir escapes, tolerar rechazos y sellar bien bajo presiones variables.

Movimiento adicional

Un tubo corto y flexible conecta el codo al dispositivo, permitiendo a los pacientes moverse con mayor facilidad sin tener que enfrentarse a las limitaciones del tubo o experimentar fugas.

Armazón blando


El almohadillado se integra suavemente en el lado del armazón que está en contacto con el rostro para garantizar la comodidad en cada punto de contacto.

Libertad visual

Permite a los pacientes ver y realizar más tareas en la cama gracias a que su armazón queda situado bajo los ojos a la par que ofrece una estabilidad integral y un menor contacto facial.

Ajuste rápido


Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los clips magnéticos que permiten conectar el arnés al armazón en cuestión de segundos.

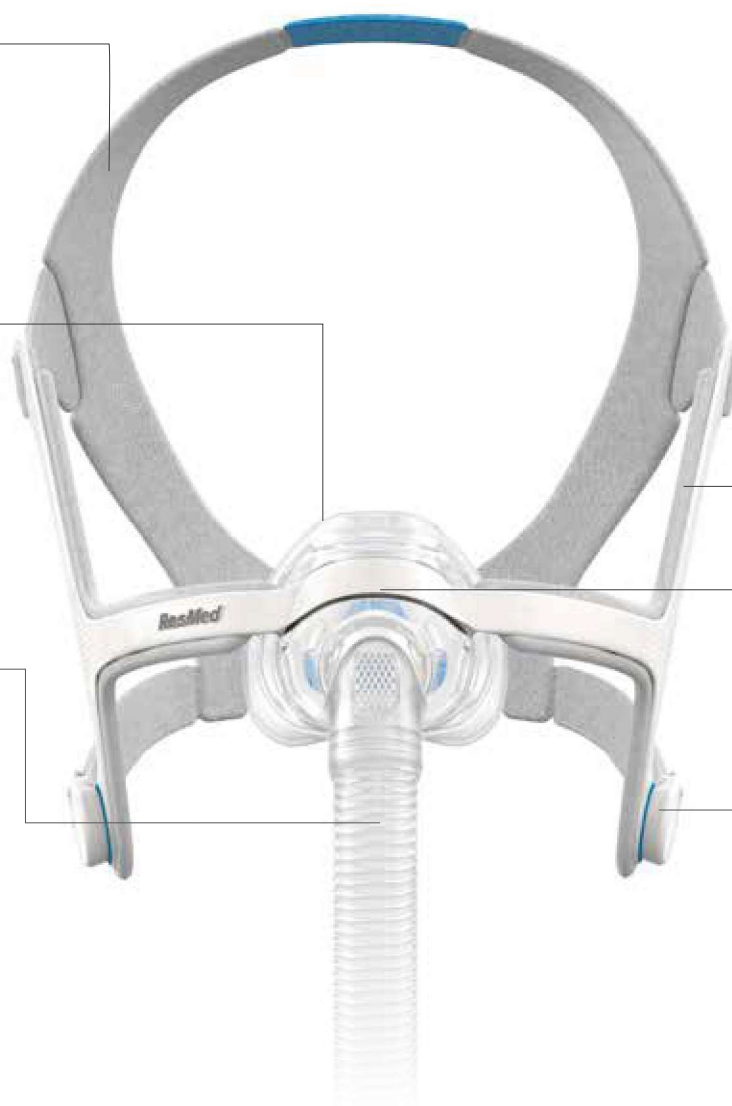


AirFit N20 for Her

Diseñado específicamente para las mujeres, ofrece un tamaño más pequeño para adaptarse a los contornos del rostro femenino.

Según la última publicación clínica,
la mascarilla AirFit N20
se adapta al 99,4% de los pacientes.¹

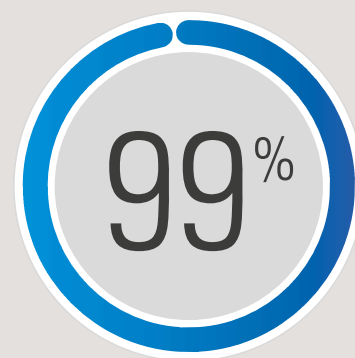

La mascarilla AirFit N20 es fácil de limpiar y usar

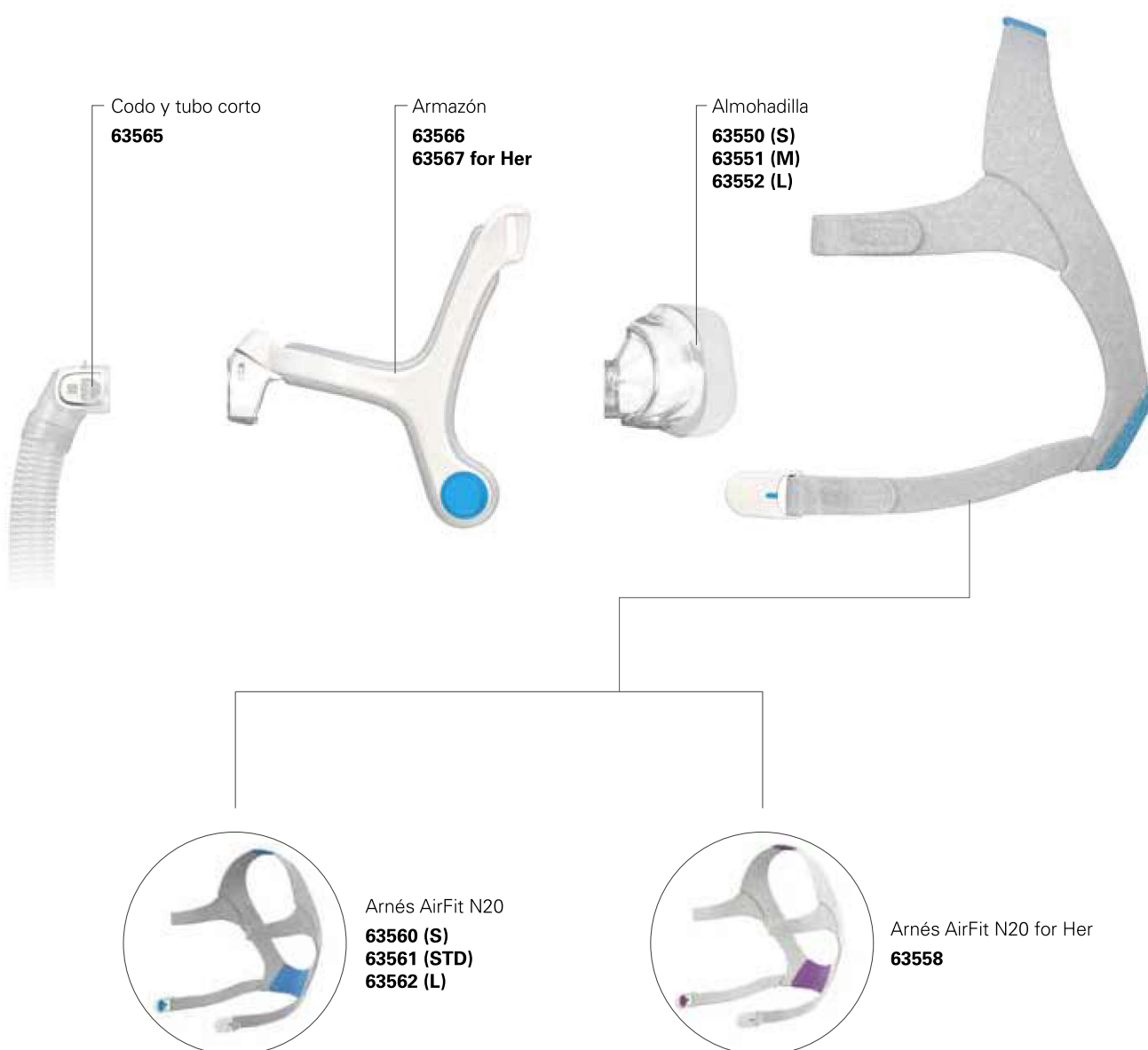


Consejos para elegir el tamaño

La mascarilla AirFit N20 incluye tres tamaños de almohadillas intercambiables: pequeña, mediana y grande. Gracias al diseño modular de AirFit N20, todos los tamaños de almohadilla encajan fácilmente en el mismo armazón, por lo que puede cambiarlas con facilidad para obtener una mayor flexibilidad.

Le recomendamos que consulte la plantilla de ajuste de la mascarilla para medir qué tamaño es el más adecuado para cada uno de sus pacientes.

Puede descargar la plantilla en:
ResMed.com/AirFitN20

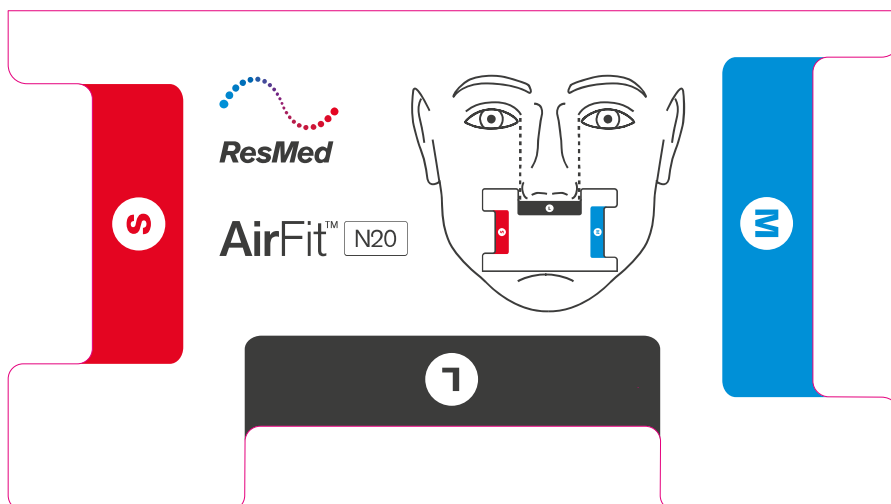


Códigos de producto

Códigos (EUR3)


AirFit N20 for Her: Pequeño	63516
AirFit N20: Mediana	63517
AirFit N20: Grande	63518



El 88% de los pacientes valoraron a AirFit N20 mejor en comodidad que a la mascarilla nasal líder del mercado.²

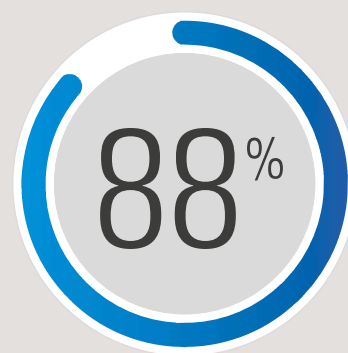

Tecnología de almohadilla evolucionada InfinitySeal: espesor variable para mayor comodidad y estabilidad

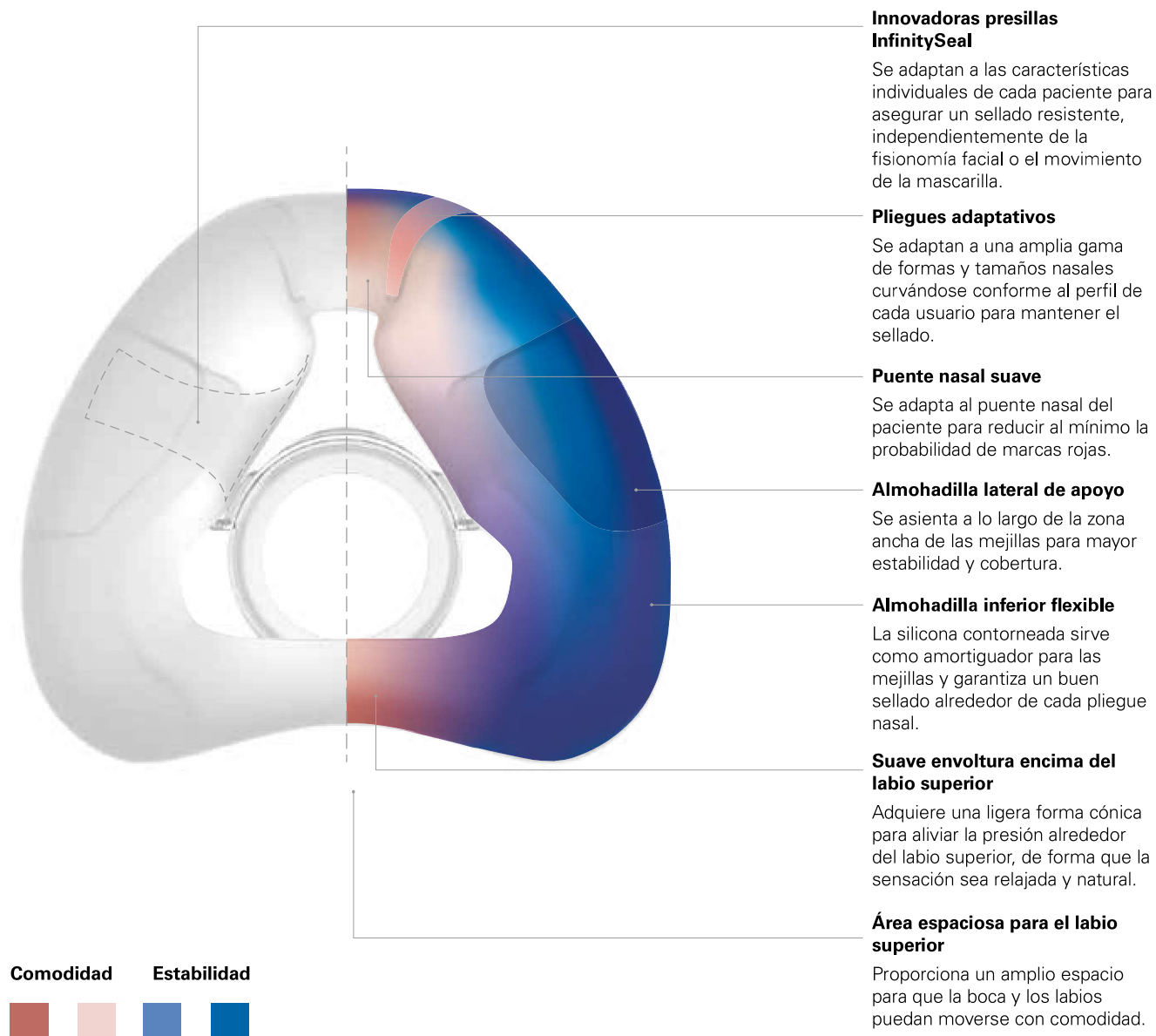

Innovadoras presillas InfinitySeal

Se adaptan a las características individuales de cada paciente para asegurar un sellado resistente, independientemente de la fisionomía facial o el movimiento de la mascarilla.

Pliegues adaptativos

Se adaptan a una amplia gama de formas y tamaños nasales curvándose conforme al perfil de cada usuario para mantener el sellado.

Puente nasal suave

Se adapta al puente nasal del paciente para reducir al mínimo la probabilidad de marcas rojas.

Almohadilla lateral de apoyo

Se asienta a lo largo de la zona ancha de las mejillas para mayor estabilidad y cobertura.

Almohadilla inferior flexible


La silicona contorneada sirve como amortiguador para las mejillas y garantiza un buen sellado alrededor de cada pliegue nasal.

Suave envoltura encima del labio superior

Adquiere una ligera forma cónica para aliviar la presión alrededor del labio superior, de forma que la sensación sea relajada y natural.

Área espaciosa para el labio superior

Proporciona un amplio espacio para que la boca y los labios puedan moverse con comodidad.

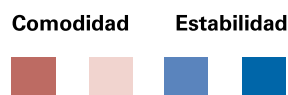

Guía de colocación de AirFit N20



- Comience asegurándose de que los imanes de las correas inferiores no están conectados.
- Si lo están, suéltelos girándolos y tirando de ellos hacia fuera del armazón.



- Coloque el arnés sobre la cabeza de forma que el logotipo de ResMed mire hacia el exterior.



- Coloque las correas inferiores de manera que ambas queden bajo las orejas.
- Lleve cada uno de los imanes hasta unirlos con su imán correspondiente del armazón.



- Tire de las cintas de ajuste de las correas superiores hasta que sienta la mascarilla nivelada y estable.
- Vuelva a fijar las cintas de ajuste.



- Repita el Paso 4 con las correas inferiores.



- Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo y, a continuación, encaje el codo en parte delantera de la mascarilla.
- Inicie el dispositivo.

Consulte la guía del usuario para obtener más instrucciones.



Opciones adicionales

- El paciente puede colocar la parte inferior del arnés por encima o por debajo del pelo para que se adapte a cualquier preferencia de peinado.

1 Estudio de ajuste global interno de ResMed AirFit N20 de 159 pacientes existentes de ResMed realizado el 12/11/2015 ; ID A3697629.
2 Estudio interno de ResMed de 24 pacientes existentes de ResMed realizado entre 23/11/2015 y 21/12/2015 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit N20 ; ID A3695085.



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

Distribuido por
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Avenue
Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

AirFit e InfinitySeal son marcas registradas de ResMed Ltd.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
© 2016 ResMed Ltd. 1019751/1 2016-10

